

908EL

Acceleratore lato sinistro



Guidosimplex

www.guidosimplex.it

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un dispositivo Guidosimplex.

Come tutti i nostri prodotti, questo dispositivo, è stato progettato e realizzato secondo i più elevati standard di qualità e nel rispetto assoluto delle vigenti normative di sicurezza.

I prodotti Guidosimplex, costruiti con i migliori materiali disponibili e sottoposti a continui test, offrono grandissima affidabilità e non richiedono particolare manutenzione.

Inoltre, come facciamo da sempre, adoperiamo la massima attenzione per non alterare in alcun modo le caratteristiche intrinseche ed il design dell'autovettura che può essere, in qualunque momento, riportata nella sua configurazione originale.

Questo prodotto Guidosimplex è in grado di soddisfare tutte quelle esigenze connesse alla sua destinazione purché vengano rispettate le modalità per il suo corretto uso.

Vi consigliamo pertanto di prendere visione del presente manuale ancor prima di utilizzare il prodotto.



DESCRIZIONE

Il dispositivo 908EL consente l'accelerazione del veicolo mediante l'arto sinistro. E' costituito da tre componenti fondamentali: un pedale acceleratore aggiunto che viene installato a sinistra del pedale del freno, una centralina elettronica I-GX-R3.0, che comanda lo scambio con il pedale originale e ne riproduce i segnali verso le centralina della vettura in funzione della posizione del pedale aggiunto ed un cablaggio che collega le varie parti.



Centralina Originale


Cavi Alimentazione Pedale



Pedale Originale




Pedale Guidosimplex

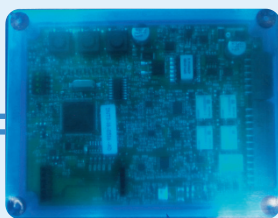

Centralina GX

Cavi dei Segnali

UTILIZZO

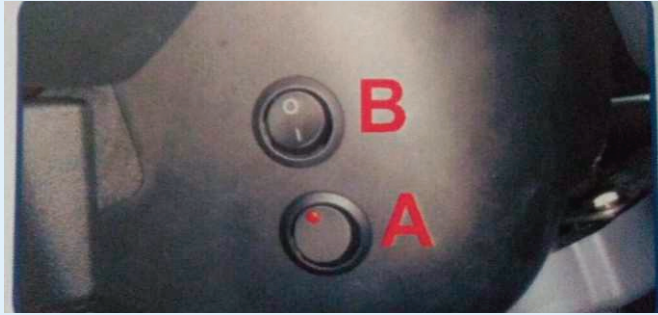


Nell'abitacolo della vettura sono presenti due interruttori Installati in una posizione facilmente raggiungibile da parte dell'utilizzatore.

A) Interruttore ON/OFF tramite questo interruttore è possibile attivare e disattivare il dispositivo di accelerazione elettronico installato alla sinistra del pedale del freno.

B) Spostando questo interruttore in posizione 1 si attiva la modalità 50% rendendo il controllo dell'accelerazione meno sensibile ottimizzandone così le performance in situazioni di continue e controllate variazioni di accelerazione, quali il traffico e le manovre di parcheggio.

ATTIVAZIONE

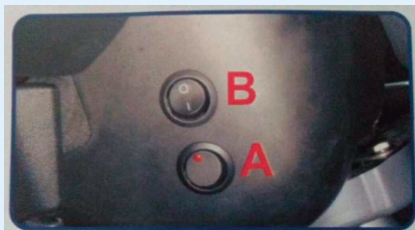

PER ATTIVARE IL DISPOSITIVO:

- 1 AVVIARE IL MOTORE**
- 2 ATTIVARE IL DISPOSITIVO PORTANDO L'INTERRUTTORE (A) IN POSIZIONE ON (LED ROSSO ACCESO) IN QUESTA CONFIGURAZIONE PER QUESTIONI DI SICUREZZA SIA IL PEDALE ACCELERATORE ORIGINALE CHE QUELLO GUIDOSIMPLEX RISULTERANNO NON OPERATIVI.**
- 3 PREMERE IL PEDALE DEL FRENO DA QUESTO MOMENTO IL PEDALE ACCELERATORE GUIDOSIMPLEX È OPERATIVO MENTRE IL PEDALE ACCELERATORE ORIGINALE È DISATTIVATO**



Se durante l'utilizzo del dispositivo di accelerazione a sinistra viene premuto accidentalmente il pedale acceleratore originale, questa manovra non procurerà alcun effetto in quanto il pedale originale non è attivo durante l'utilizzo di quello Guidosimplex e viceversa.



PER POTER UTILIZZARE LA VETTURA CON IL PEDALE ACCELERATORE ORIGINALE È NECESSARIO DISATTIVARE IL DISPOSITIVO GUIDOSIMPLEX ATTRAVERSO L'INTERRUTTORE (A) (LED ROSSO SPENTO)

Nel caso di anomalie o malfunzionamenti del dispositivo la invitiamo a recarsi presso un centro di assistenza autorizzato Guidosimplex.

Potrà trovare il centro di assistenza più vicino consultando il sito internet

www.guidosimplex.it

Questo Manuale dell'Utente è pubblicato da Guidosimplex S.r.l. e non comporta in sé alcuna garanzia.

Guidosimplex S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza notifica, eventuali modifiche e miglioramenti a questo manuale dovuti ad aggiornamenti dei dispositivi e/o dei programmi.

Tutti i diritti riservati. © Guidosimplex S.r.l.



Guidosimplex S.r.l.
Via del Podere San Giusto, 29
00166 Roma
Tel. 06 6152801 r.a.
Fax 06 61528036
infoclient@guidosimplex.it

www.guidosimplex.it

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO